

事務連絡  
令和3年7月28日

神奈川県医師会 御中  
神奈川県歯科医師会 御中  
神奈川県病院協会 御中  
神奈川県精神科病院協会 御中  
神奈川県看護協会 御中

神奈川県健康医療局医療危機対策本部室

ヘンケジェクトシリンジ使用時の目盛り合わせの留意点

本県の健康医療行政の推進につきましては、日頃格別の御協力をいただき厚くお礼申し上げます。

標記について、令和3年7月12日付けで厚生労働省健康局健康課予防接種室から別添のとおり、シリンジの目盛り合わせに係る留意点がありましたので、送付いたします。

なお、本シリンジはモデルナ社製ワクチンの接種用として使用されているものになりますので、必要に応じて貴会会員への周知につきましてもよろしく願いいたします。

問合せ先


神奈川県医療危機対策本部室  
ワクチンチーム 松田、村山  
電話 045-285-0716 (直通)



# シリンジの目盛り合わせの留意点

ヘンケジェクト ディスポシリンジ2ml (3ml) は、目盛り合わせ位置に注意が必要です。

正しい目盛り合わせ

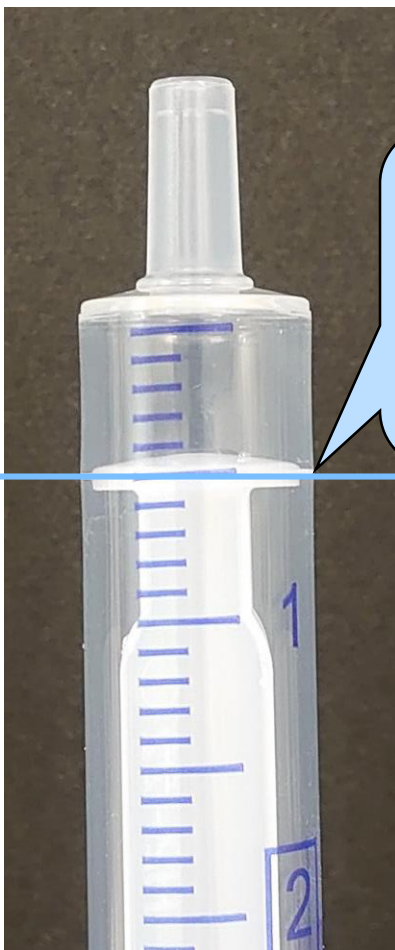


外筒とプランジャーが密着している部分を採取したい量の目盛に合わせてください。

(大阪ケミカル (株) 確認済)



正しい目盛り合わせ位置

誤った目盛り合わせ

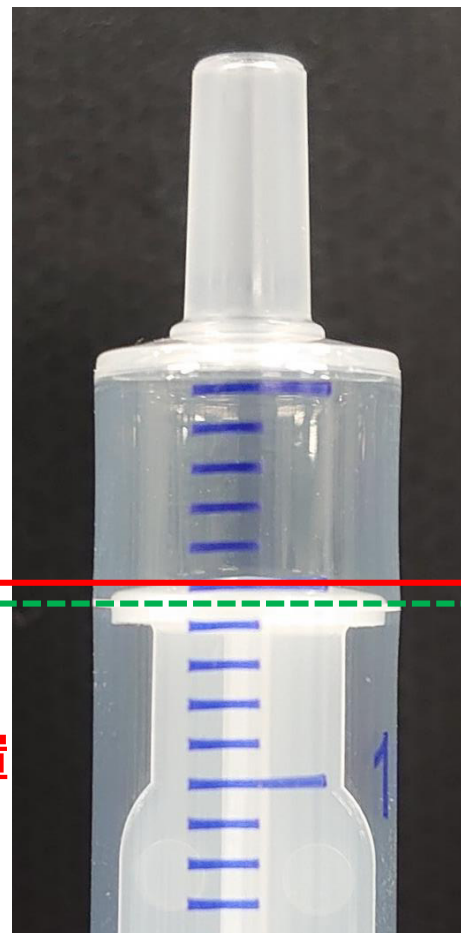

誤った目盛り合わせ位置

実際の採取量

1本あたり薬液を多く秤取することになり、結果的に10本分の採取が困難になります。